

# Plastové kapiláry end-to-end a Plastové kapiláry neutrální (bez antikoagulantu)

## Popis výrobku

Účel použití: In-vitro diagnostika pro odběr kapilární krve s antikoagulancii nebo bez nich, nádoba na vzorky pro odběr a dodání vzorků krve z lidského těla pro následná in-vitro diagnostická stanovení

Objem náplně: viz obal Antikoagulant: viz obal

Podmínky skladování: 2 °C - 30 °C / uchovávejte v suchu / chraňte před slunečním zářením

## Upozornění a omezení použití

- Plastové kapiláry smí používat pouze vyškolený zdravotnický personál.
- Při manipulaci s biologickým vzorkovým materiálem je třeba dodržovat nezbytné hygienické předpisy. Odebrané vzorky mohou obsahovat nebezpečné patogeny. Je nutné používat ochranné rukavice, brýle a vhodný ochranný oděv. Riziko infekce!
- Analýza by měla být provedena ihned po odběru vzorků. Pokud je vzorek před měřením uložen v plastové kapiláře, může dojít k sedimentaci a změnám naměřených hodnot.
- Tento produkt není vhodný pro invazivní aplikace! Nahlédněte prosím do příslušné literatury.
- Plastová kapilára je určena pouze k jednorázovému použití a musí být po použití řádně zlikvidována.

## Odběr vzorků krve

1. O místě vpichu a provedení odběru (včetně dezinfekce kůže) musí rozhodnout ošetřující lékař.
2. Stimulujte krevní oběh v oblasti kůže (místo vpichu), například pomocí tepelného zábalu.
3. Propíchněte kůži, aby se rychle vytvořily kapky krve. Odstraňte první kapku krve. Plastovou kapiláru zcela naplňte krví ze středu kapky krve a zbavte se vzduchových bublin.
4. Analýza by měla být provedena ihned po odběru vzorků.

Používejte v souladu s návodem k použití použité diagnostické sady / stroje.

## Likvidace

Plastovou kapiláru krevního plynu zlikvidujte v souladu s platnými místními nebo laboratorními předpisy (biologicky znečištěné – nebezpečný odpad!).



Tento výrobek splňuje požadavky zákona o zdravotnických prostředcích a evropské směrnice 98/79/EG pro diagnostiku in vitro



In-vitro-Diagnostikum



Pouze pro jednorázový odběr vzorků. Nevhodné pro opětovné použití nebo opakované zpracování.



Skladujte při 2 °C - 30 °C



Chraňte před vlhkostí/skladujte v suchu



Chraňte před horkem/chraňte před sluncem



Výrobce:

SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH  
Im Lochelchen 11 – 515 88 Numbrecht – Germany  
[www.sanguis-counting.de/ifu/pcfbg](http://www.sanguis-counting.de/ifu/pcfbg)

Dovozce:

BH LABOR – Ing. Mgr. David Hepnar, MBA  
5. května 250/34  
360 01 Karlovy Vary